

Quick guide til RotoBed® Care

Udstigning: Hold tasten **Stole-position** inde, til sengen standser i komfort-position. Udløs dreje-mekanismen med et let fod-tryk på grebet og drej roligt sengen rundt, til grebet låser. Tryk igen på **Stole-position**, til sengen standser. For at lette udstigningen kan ryglænet køres det sidste stykke frem og sengen hæves lidt i højden.




Indstigning: Hjælp bruger med at skubbe enden så langt tilbage som muligt. Hold tasten **Liggeposition** inde, indtil sengen standser i komfort-position. Drejemekanismen udløses med et let fod-tryk på grebet. Drej roligt sengen ind, til grebet selv låser. Tast atter **Liggeposition**, til liggefladen er vandret.



Standard sædehøjde uden madras er 32 cm over gulvet. For individuel indstilling, se brugsanvisningen.

Fjernbetjening

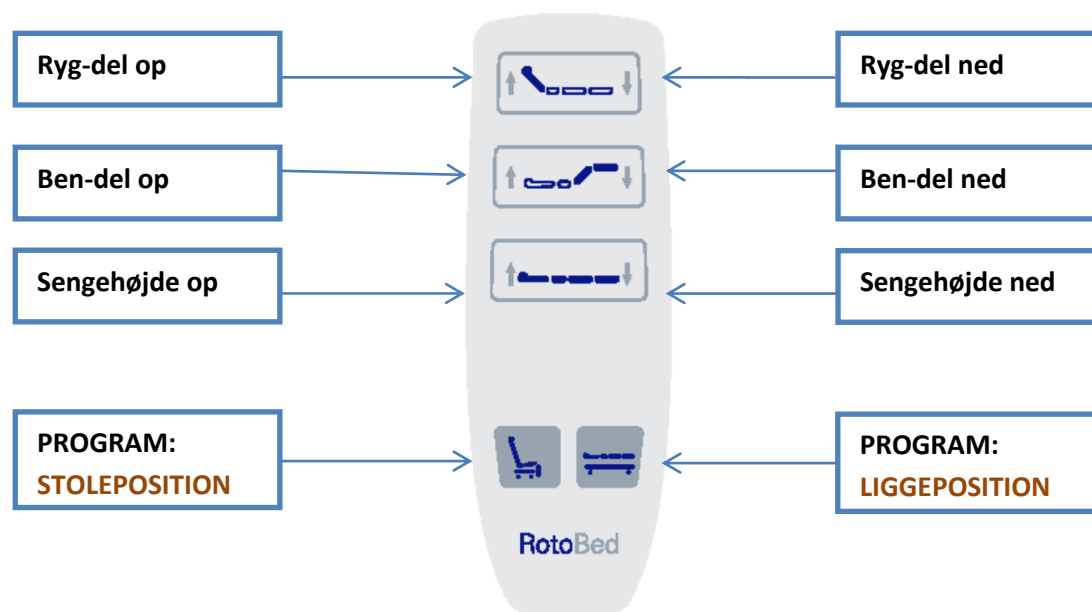

RotoBed®Care kan dreje mod enten højre eller venstre. Derfor kan fjernbetjeningen også valgfrit tilsluttes højre eller venstre side af sengen. Efter ønske kan tilkøbes ekstra fjernbetjening. Når fjernbetjeningen ikke anvendes, hænges den på sengehesten.

Montering af madras


Til RotoBed®Care hører en madras bestående af en hoved-del samt en fod-del.

Hovedmadrassen er udstyret med 5 knapper på bagsiden. Anbring først de tre nederste knapper i rillerne nederst i liggefladen. Skub madrassen mod fodenden. Nu trykkes de to knapper midt på madrassen ned i de tilhørende huller midt på liggefladen.

Tilsvarende har fodmadrassen to knapper, som trykkes ned i de to runde huller i liggefladen.

Montering af sengeheste

RotoBed® senge kan leveres med sengeheste af træ eller metal. Uanset model monteres og fjernes sengehestene på samme måde:

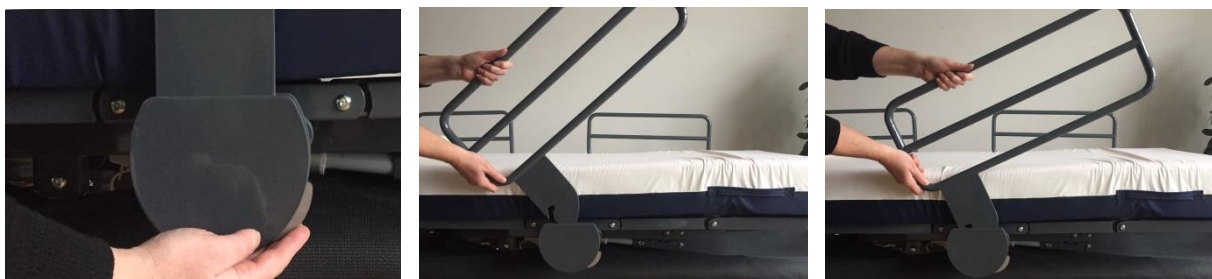

Tryk på det lille beslag fornedet samtidig med, at sengehesten løftes. Sengehesten sættes på igen og låser automatisk.

Hjul og bremser

Sengen er som standard udstyret med integral Tente Linea dobbelthjul. Hjulene er drejelige og parvis bremsbare, og de kan betjenes fra begge sider af sengen.



OBS: RotoBed®Care bør ikke benyttes af personer uden introduktion i brugen af sengen. Sengen er testet efter de nyeste gældende normer og regler for plejesenge. Vær opmærksom på, at hverken børn eller dyr befinder sig under sengen, når sengens dele indstilles. Når sengens ben-del er hævet, må denne ikke belastes af personer eller tunge genstande. Sengen må benyttes af brugere indenfor følgende kriterier: Vægt 40-190 kg. Højde \geq 146 cm. BMI \geq 17.